



Latex frei



Für eine sichere und einfache Dilatation.

Anwendungsbereich

Hydrophiler Einmalkatheter zur Dilatation.
Für den häuslichen oder klinischen Gebrauch.

Materialzusammensetzung

Hydrophile Oberfläche: PVP (Polyvinyl Pyrrolidon) und Kochsalz (NaCl)
Katheter: Hochwertiger medizinischer PVC (Polyvinylchlorid)
Einzel steril verpackt: Beschichtetes Papier, Verbundfolie aus Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE)

Verpackung

25 Katheter pro Karton
Transportkarton mit 4x 25 Kathetern
Mindestbestellmenge 5 Katheter


Sterilisation und Haltbarkeit

Die Sterilisation der Katheter erfolgt durch Ethylenoxidgas.
Auf jeder Einzelverpackung befindet sich ein Verfallsdatum (Monat und Jahr).

Produktsortiment

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Größe
89 16 00	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 16
89 18 00	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 18

Gebrauchsanweisung

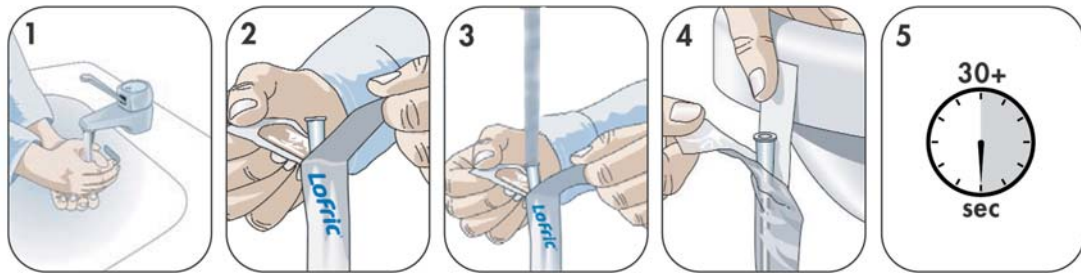

1. Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser. 2. Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig, indem Sie die Laschen am oberen Ende der Verpackung vorsichtig 5 - 6 cm auseinanderziehen. 3. Füllen Sie Flüssigkeit (z.B. steriles Aqua dest. oder physiologische Kochsalzlösung) direkt in die Verpackung. 4. Die Verpackung besitzt eine Klebeetikette. Entfernen Sie die blaue Schutzfolie und kleben Sie die Verpackung auf einer geeigneten Oberfläche fest. 5. Lassen Sie den Katheter mindestens 30 Sekunden in der Flüssigkeit. Danach führen Sie die Dilatation durch.